

ELPA

充電式 イヤホン型集音器
AS-E002

取扱説明書

保証書付

EARLIS Charge

ACTIVE COMMUNICATION TOOL



本品は医療機器ではありません

本品はBluetooth非対応です。
スマートフォン等との接続はできません。

お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

250613A

目次

■ 安全上のご注意	01
■ 使用上のご注意	03
■ 廃棄時のお願い	03
■ 集音器を初めてご使用になる方に	04
■ 各部の名称	
充電ケース・集音器本体	06
付属品	07
■ ご使用前の準備	
充電ケースへの充電方法	08
集音器本体への充電方法	09
イヤピースの交換方法	10
■ ご使用方法	
電源の入れ方	11
装着する	11
音量調整の方法	12
電源の切り方	12
■ 故障かなと思ったら	13
■ お手入れについて	14
■ 仕様	15

ご使用前に必ず初期充電を行ってください

内蔵の充電電池は製造時に十分充電しておりますが、充電電池の特性上自然放電しますので、商品お買い上げ時には放電している場合があります。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告



禁止

- 集音器本体や充電ケースに水や異物を入れない。【火災・感電・故障の原因】
- 幼児やペットなどに誤って触らせない。【ケガの原因】
- USBケーブルを器具本体に巻きつけたり、コードを束ねたまま使用しないでください。【火災・感電の原因】
- USBケーブルの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】
- USBケーブルが傷んだまま使用しないでください。芯線が露出・断線したまま使用すると火災の原因となります。
- 燃えやすい物や引火しやすい物の近くでは充電および使用しないでください。






必ず守る



- ACアダプターを使用する場合は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

警告

 電源プラグ を抜く	●異常を感じたときは、速やかにコンセントからACアダプターを抜いてください。 煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。 また、お客様による修理は危険ですので、販売店もしくは当社にご相談ください。
 水ぬれ禁止	●集音器本体や充電ケースに水をかけたり濡らしたりしない。【火災・感電・故障の原因】 ●ACアダプターの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。【火災・感電・故障の原因】
 分解禁止	●分解・改造はしないでください。また指定以外の取り付け部品を使用しないでください。 【火災・感電・故障の原因】

注意

 禁止	●異常に温度が高くなるところに置かない。 ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。 ・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。 ●音量を上げすぎない。 この製品は医療機器ではありません。 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと聴力に悪い影響を与えます。 ●本体をベンジン、シンナーなどで拭かない。 変形、変色の原因になります。
 必ず守る	●イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する。 そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

使用上のご注意

- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 集音器本体や充電ケースに強い衝撃を与えたり、圧力をかけたりしないでください。
- 集音器本体及び充電ケースの充電電池の交換はできません。
- 変形や故障の原因になるため、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。
- 極度の低温下では充電電池の能力が低下する場合があります。
- 異常を感じたときは、ただちに使用を中止してください。
- ご使用前に必ず初期充電を行ってください。

廃棄時のお願い

- 本品に内蔵される充電式電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
本品を使用後は、家庭ごみとして捨てずに、自治体の指示に従って正しく処理してください。



危険

- 火の中に捨てたり加熱したりしないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
- 分解・修理・改造をしないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
- 液漏れしたとき、液に触れないでください。目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
- 直射日光の当たるところや暖房器具の側など高温になる場所で放置しないでください。
【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】

集音器を初めてご使用になる方に

ご使用になる際は、短時間から徐々に耳を慣らしていく事をおすすめしています。

1週間目

まずは慣れましょう

初めて集音器を装着すると、少し不快に感じるかもしれません。耳の中に異物があるように感じたり、突然声が大きく聞こえたり、今まで聞いていた音が少し違って聞こえたりすることがありますが、これは正常です。最初の1週間は静かな室内環境で30分間ずつ装着することをお勧めします。はじめは長く装着せず、徐々に長くしていきましょう。

2週間目

聞く練習

おなじみの曲を聴いたり、リラックスできるテレビ番組を見たりしてください。公園などの屋外の静かな場所に行くと、今まで聞こえなかった音が聞こえたり、以前よりも明瞭に聞こえることに気づくでしょう。装着時間は1日2～4時間が目安です。

集音器を初めてご使用になる方に(つづき)

3週間目

会話の練習

駅やスーパーマーケットなどの公共の場所で会話の練習をするときは、できるだけ親しい人と話すようにしてください。ただし、相手にはゆっくり話し、できるだけはっきりと発音してもらうよう頼んでください。ひとつひとつの会話は長くなりすぎないようにしてください。装着時間は1日4～6時間が目安です。

4週間目

積極的に会話してみましょう

自然と聞こえるようになりますので、様々なシーンでお楽しみください。

各部の名称

充電ケース



- ①充電用端子
- ②充電表示LED
- ③USBケーブル差し込み口

集音器本体



- ④イヤークリップ
- ⑤充電用端子
- ⑥マイク
- ⑦表示LED
- ⑧タッチ操作部

各部の名称(つづき)

付属品

ご使用前にすべてそろっていることをお確かめください。



- ⑨USBケーブル
- ⑩ACアダプター
- ⑪クリーニングブラシ
- ⑫イヤークリップSML 各2
※ご購入時はMサイズが集音器
本体に取り付けられています



- ⑬収納ポーチ
- ⑭取扱説明書
- ⑮簡単マニュアル

ご使用前の準備

充電ケースと集音器本体のそれぞれに充電電池が入っており、それぞれに充電が必要です。

■充電ケースへの充電方法

付属のUSBケーブルのType-C端子を充電ケースのUSBケーブル差し込み口に差し込み、もう一方のUSB端子を付属のACアダプターやパソコン等のUSB機器に接続します。



●充電中は充電表示LEDが青色で点滅します。



●充電完了後は充電表示LEDが青色で点灯します。



充電ケースの充電表示LEDで充電残量が分かります。

表示ランプ	充電完了率
4 white circles	0~25%
1 blue circle, 3 white circles	26~50%
2 blue circles, 2 white circles	51~75%
3 blue circles, 1 white circle	76~99%
4 blue circles	100%

- LED点滅
- LED点灯
- LED消灯

※充電ケースへは約2時間で満充電となります。
(ACアダプター使用時)
充電条件によって充電時間は変わります。


ご使用前の準備(つづき)

■集音器本体への充電方法


最初に集音器本体の絶縁テープを剥がしてください。

集音器本体を充電ケースに収納すると充電を開始します。
充電中は集音器本体の表示LEDが白く点灯し、満充電されると表示LEDが消灯します。

●充電中は表示LEDが白色で点灯

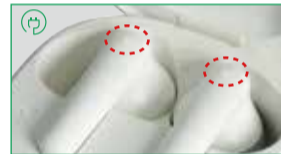

●充電完了後は消灯

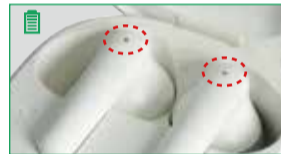

※集音器本体へは約2時間で満充電となります。
充電条件によって充電時間は変わります。

ご使用前の準備(つづき)

■イヤークリップの交換方法

本品にはあらかじめMサイズのイヤークリップが装着されています。
サイズが合わない場合はSまたはLサイズのイヤークリップに交換してください。

※イヤークリップを外す際は、イヤークリップ部分を引っ張ってください。
イヤークリップを装着する際は奥まで押し込んでください。



ご使用方法

■電源の入れ方

充電ケースから集音器本体を取り出すと自動で電源がオンになり、集音機能が開始されます。



電源がオンになると表示LEDが緑色で約3秒間点灯します。

■装着する

「L」表示の集音器本体を左耳に、「R」表示の集音器本体を右耳に装着してください。集音器本体をしっかり耳にいれてください。

※イヤークリップのサイズが耳穴のサイズに合っていないと、しっかり耳に入っていないとキーンという音の原因になりますので、サイズの合ったイヤークリップを選んでください。



ご使用方法(つづき)

■音量調整の方法

左右それぞれで音量調整が可能です。
指でタッチ操作部を押すと音量が上がり、下記のような音が鳴ります。
レベル5まで音量を上げた後にもう一度タッチ操作部を押すと音量がレベル1に戻ります。

音量段階	お知らせ音
レベル1	プププー
レベル2	ププー
レベル3	ププー
レベル4	ププー
レベル5	プププー



■電源の切り方

集音器本体を充電ケースに戻すと自動的に電源がオフになります。



故障かなと思ったら

修理を依頼する前に下記の内容をご確認ください。

故障状況	原因および解決方法
音が出ない	●電池が消耗している ⇒ 充電してください。
	●音量が最小になっている ⇒ 音量を調整してください。
充電されない	●集音器本体が充電ケースに正しくセットされていない ⇒ 正しくセットしてください。
	●充電ケースのUSBケーブルが正しく差し込まれていない ⇒USBケーブルを充電ケースのUSBケーブル差し込み口に奥まで差し込んでください。
	●充電ケースの電池が消耗している⇒充電ケースを充電してください。
使用時に キーンという音 がする	●イヤープースのサイズが合っていない⇒イヤープースのサイズを変更してください。
	●集音器本体がしっかり耳にはまっていない。⇒集音器本体をしっかり耳にはめてください。
	●マイク穴がふさがっている⇒マイク穴をふさがらないでください。
	●音量が大きすぎる⇒音量を小さくしてください。

お手入れについて

■ご使用後のお手入れ

- 集音器本体についた耳あか・ほこりを付属のクリーニングブラシで掃除してください。
- 汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。



- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。



仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

電源(集音器本体)	充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh ※充電電池の交換はできません。
電源(充電ケース)	充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh ※充電電池の交換はできません。
連続使用時間	約30時間 ※満充電時、ボリューム最大時 ※使用期間や使用環境により、連続使用時間は短くなる場合があります。
充電時間(集音器本体)	約2時間 ※電池の性能、使用条件により充電時間は短くなる場合があります。
充電時間(充電ケース)	約2時間 ※電池の性能、使用条件により充電時間は短くなる場合があります。
最大音響利得	約30dB
最大音圧レベル	約117dB
ボリューム	音量調整5段階
外形寸法(集音器本体)(約)	高さ36mm×幅23mm×奥行20mm
外形寸法(充電ケース)(約)	高さ54mm×幅30mm×奥行54mm
質量(集音器本体 片耳)	約4g
質量(充電ケース)	約38g
セット内容	集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤープースSML各2 クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル

仕様(つづき)

- ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。
- ※内蔵の充電電池は製造時に十分充電しておりますが、充電電池の特性上自然放電しますので、商品お買い上げ時には放電している場合があります。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

MEMO
